



Οδηγίες Χρήσης Ραβδωτού Αεροστρώματος Κατακλίσεως



0806591 - 0810160



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα αεροστρώματα μπορούν να περιορίσουν & να θεραπεύσουν τα έλκη κατάκλισης σε χρόνια κατακλιμένους ασθενείς ή σε άτομα με πολύωρη παραμονή στο κρεβάτι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νοσοκομειακή ή οικιακή χρήση. Κατανέμουν ομοιόμορφα την πίεση στο σώμα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οιδήματος.

Η αεραντλία εναλλάσσει την πίεση του αέρα στο στρώμα δημιουργώντας την αίσθηση ελαφρού μασάζ & ενεργοποιεί τα ακινητοποιημένα λόγω της κατάκλισης κύτταρα.


ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- ❑ Τοποθετήστε το αερόστρωμα πάνω από το στρώμα του κρεβατιού, έχοντας πρώτα τεντώσει το κάτω σεντόνι, προσέχοντας η είσοδος του αέρα να βρίσκεται στην μεριά των ποδιών.
- ❑ Τοποθετήστε πάνω από το αερόστρωμα ένα λεπτό αναπνέον ύφασμα, εφόσον δεν συνοδεύεται από δικό του κάλυμμα, ώστε να μην έρχεται σε απευθείας επαφή με το δέρμα του ασθενούς.
- ❑ Συνδέστε το στρώμα με την αντλία χρησιμοποιώντας τους καταλλήλους σωλήνες που υπάρχουν στην συσκευασία. Συνδέστε την αντλία στο ρεύμα & γυρίστε τον διακόπτη στο μέγιστο, ώστε να φουσκώσει το στρώμα.
- ❑ Όταν το στρώμα φουσκώσει εντελώς μπορείτε να ρυθμίσετε την ροή του αέρα, ανάλογα των απαιτήσεων του χρήστη, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!)

Ισχύουν ΜΟΝΟ για τον κωδικό 0810160

- Τοποθετήστε τα επιπλέον τμήματα κάτω από το στρώμα του κρεβατιού.
- Το στρώμα διαθέτει οπές αερισμού.

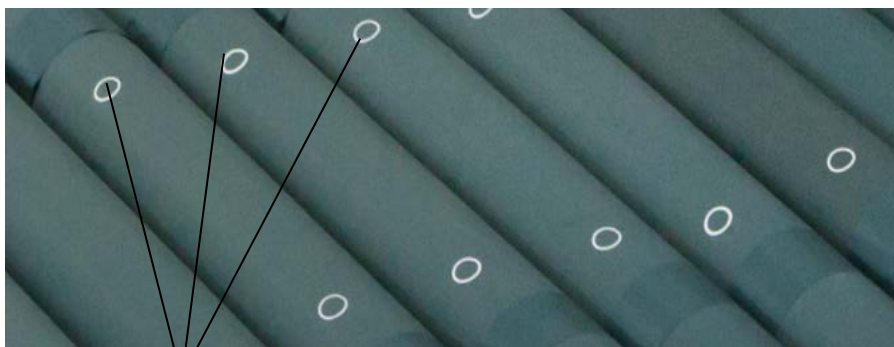

Οπές Αερισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΛΙΑ	Ηλεκτρικά	AC220-240V/100-120V, 50/60HZ
	Εξοδος	≥ 4 - 7 ΛΙΤΡΟ / ΛΕΠΤΟ
	Ευρος πιεσεων	≥ 0,12 BAR
	Κυκλος εναλλαγης	10 – 12 ΛΕΠΤΑ
	Ισχυς	≤ 10VA +25%
	Θορυβος	≤ 50 dB
ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΨΕΛΩΤΟ	Διάταξη	Αεροθάλαμοι Σωληνωτοί
	Υλικο	Πολυβινυλοχλωρίδιο Ιατρικής Κλάσης
	Διαστασεις	200x95x6,3 cm
	Μέγιστο Βάρος	150 Kgr

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην αποσυνδέετε τους σωλήνες ενώ η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα κοντά στο στρώμα.
- Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εστία φλόγας κοντά στο στρώμα.
- Μην ξεπερνάτε το μέγιστο φορτίο (κιλά) που υποδεικνύει ο κατασκευαστής.
- Διατηρείτε την αντλία σε καθαρό & στεγνό περιβάλλον.
- Για τον καθαρισμό του στρώματος χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι και νερό με σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, όξινα ή άλλα χημικά καθαριστικά.
- Η αντλία διαθέτει ασφάλεια RF1 05x20, 1,5A. Αν χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, αποσυνδέστε την αντλία από το ρεύμα & χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι γυρίστε το καπάκι της ασφαλειοθήκης σε αντίθετη προς του δείκτες του ρολογιού φορά (αριστερά).
- Η αντλία διαθέτει φίλτρο σκόνης. Παρακαλείστε να ελέγχετε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ότι το φίλτρο είναι καθαρό. Αν χρειαστεί πλύνετε το φίλτρο με νερό, στεγνώστε το καλά & επανατοποθετήστε το στην θέση του. Αν η συσκευή λειτουργεί με βρώμικο φίλτρο θα μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή βλάβη της συσκευής. Το φίλτρο πρέπει να ελέγχεται τακτικά.
- Αν χρειαστεί να αποθηκεύσετε το στρώμα, αδειάστε το από τον αέρα, διπλώνοντάς το.
- Να αποθηκεύεται σε στεγνό, καθαρό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ❑ Προστατέψτε το προϊόν από έλαια, λοσιόν και κρέμες, σκεπάζοντάς την επιφάνεια του με βαμβακερό η μάλλινο ύφασμα ή μία πετσέτα μπάνιου.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση το οινόπνευμα όταν καθαρίζετε το προϊόν. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο υλικό του .
- ❑ Καθαρίσετε το προϊόν μετά από κάθε ημερήσια χρήση. Σας συνιστούμε να το καθαρίζετε με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να την προστατεύσει από τους λεκέδες λαδιού και σκόνης. Μια κοινή πρακτική είναι να χρησιμοποιήσετε ένα μπουκάλι ψεκασμού γεμάτο με ένα μείγμα από αντι-βακτηριακό σαπούνι και νερό. Ψεκάστε το προϊόν & έπειτα σκουπίστε το με μια καθαρή πετσέτα. Η καλύτερη λύση είναι να καθαρίζεται με ζεστό νερό ανακατεμένο με ήπιο σαπούνι και μετά να σκουπίζεται καλά.
- ❑ Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κωδικός	Περιγραφή
0808578	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜ.ΡΑΒΔΩΤΟΥ
0808279	ΑΝΤ/ΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛ.ΡΑΒΔ (0806591)
0810209	ΑΝΤΑΛ/ΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (0806591 0810160)
0810561	ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΡΑΒΔ.ΑΕΡΙΖ. LASER (0810160)
0810210	ΑΝΤΑΛ/ΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕ ΑΕΡΙΣΜΟ (0810160)
0810078	ΦΙΛΤΡΟ ΜΗΧ.ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΜΑΤΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη στον μηχανισμό & έξι (6) μήνες στο στρώμα & τα υπόλοιπα μη μηχανικά μέρη. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση / συντήρηση του προϊόντος.

Φόρμα Εγγύησης

Στοιχεία Αγοραστή

Όνοματεπώνυμο :

.....

Ημ/νία Αγοράς:

Τηλέφωνο:

Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία :

.....

Διεύθυνση:.....

.....

Τηλέφωνο:

Σφραγίδα καταστήματος

MOBIAK A.E

Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης

MOBIAK S.A

Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΙ 96-98 Chania-Crete, Greece

+30-28210-63222

www.mobiakcare.gr

Οδηγίες Χρήση Ραβδωτού Αεροστρώματος Κατακλίσεως 0806591 -
0810160