



Οδηγίες Συναρμολόγησης


1. Αφαιρέστε τα περιεχόμενα από την συσκευασία και τοποθετήστε τα δύο μέρη του τραπεζιού (1 & 1s) ανάποδα με τις σωλήνες σύνδεσης (5 & 5s) προς τα πάνω. Βλ. Εικ. 2

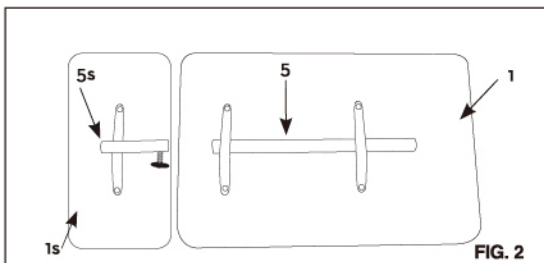


2. Τοποθετήστε τον μοχλό (3) πάνω στην κορυφή της μεταλλικής στήλης (2) και ασφαλίστε με τη βίδα και το παξιμάδι (4). Βλ. Εικ. 1

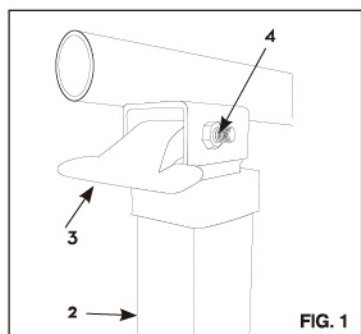

3. Αφαιρέστε τον τριγωνικό μοχλό (16), τον αποστάτη (17) και την εσωτερική σωλήνα (6) από την εξωτερική σωλήνα (18). Βλ. Εικ. 3

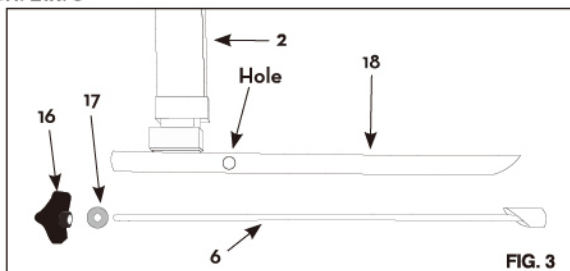


4. Τοποθετήστε την εξωτερική σωλήνα (18) στην μεταλλική στήλη (2) μέσα από την σωλήνα σύνδεσης (5s) στο μικρό κομμάτι του τραπεζιού (1s). Ύστερα περάστε την εξωτερική σωλήνα από τον σωλήνα σύνδεσης (5) του μεγάλου μέρους του τραπεζιού (1). Εισάγετε την εσωτερική σωλήνα (6) στον σωλήνα σύνδεσης (5). Σφίξτε την βίδα (19) στην τρύπα του εξωτερικού σωλήνα (18)

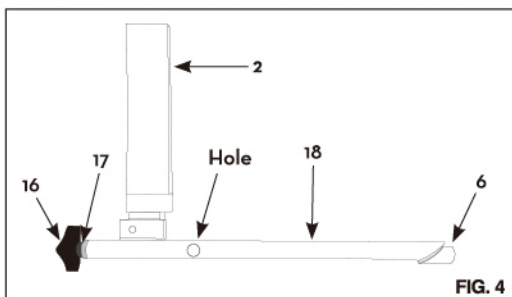


5. Επανατοποθετήστε τον τριγωνικό μοχλό (16) και τον αποστάτη (17) και ασφαλίστε σφίγκοντας τον μοχλό.


6. Τοποθετήστε τα δύο ροδάκια με φρένο (8) στην βάση (7) από την μεριά της μεταλλικής στήλης (2). Τοποθετήστε τα ροδάκια χωρίς φρένο (9) στην αντίθετη μεριά της βάσης. Βλ. Εικ. 5

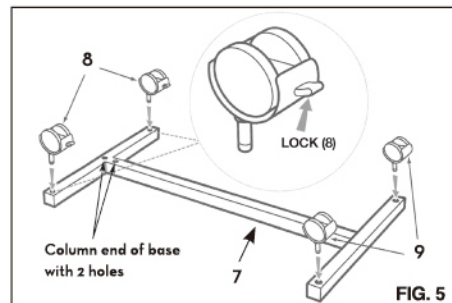

7. Τοποθετήστε τα δύο καλύμματα των βιδών (10) στην αναποδογυρισμένη βάση (7) και περάστε δύο βίδες (12) από την βάση των βιδών (11) και τα καλύμματά τους. Τοποθετήστε την βάση (7) πάνω στον μεταλλικό σωλήνα (2) και περάστε βίδες στο κάτω μέρος της στήλης (2), σφίξτε με γαλλικό κατασαβίδι 16mm. Βλ. Εικ. 6

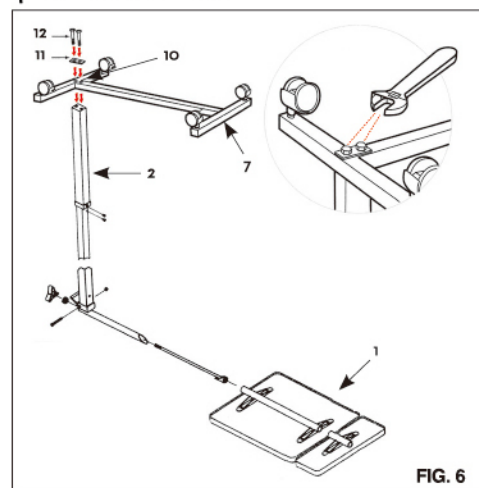


8. Γυρίστε το τραπέζι ανάποδα για να στηριχθεί στα ροδάκια.
9. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτό το βήμα πρέπει να εκτελεστεί τελευταίο για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στον μηχανισμό του ελατηρίου. Αφαιρέστε την μαύρη βίδα (13) στην μεταλλική στήλη (2) που αναγράφει «Remove for Assembly» και αντικαταστήστε την με την βίδα χρωμίου (14) που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία των εργαλείων. Μην αφαιρέσετε την βίδα χρωμίου που αναγράφει «Do Not Remove». Βλ. Εικ 7 & 8.

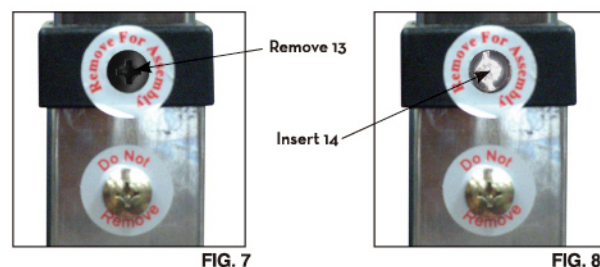


ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΒΙΔΑ (13) ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ (2) ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ. ΑΦΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΒΙΔΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΔΑ ΧΡΩΜΙΟΥ (14) ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

Η ΚΑΤΩ ΒΙΔΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ «DO NOT REMOVE» ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

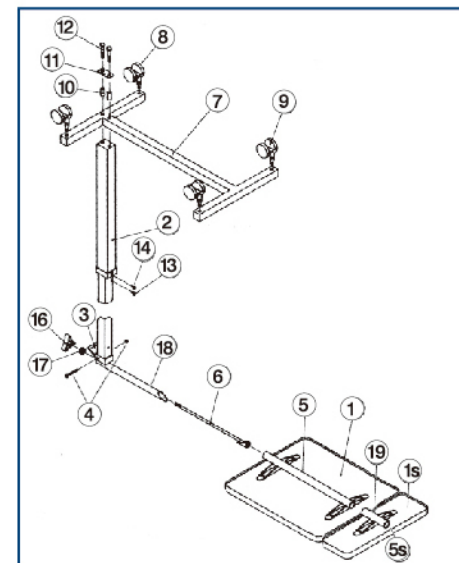

Κατάλογος Ανταλλακτικών

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Μεγάλο Μέρος Τραπεζιού | 10. Καλύμματα Βιδών (x2) |
| 1s. Μικρό Μέρος Τραπεζιού | 11. Βάση Βιδών |
| 2. Μεταλλική Στήλη | 12. 3/8 - 15x2 Βίδες (x2) |
| 3. Μοχλός Ασφάλισης | 13. Μαύρη Βίδα |
| 4. 1/4 - 20 x 2 1/8 Βίδα & Παξιμάδι | 14. Βίδα Χρωμίου (για αντικατάσταση της μαύρης βίδας) |
| 5. Σωλήνα Σύνδεσης Τραπεζιού Μεγάλη | 15. Μοχλός Ασφάλισης 1/4x20 1/2 (μέσα στην μεταλλική στήλη) |
| 5s. Σωλήνα Σύνδεσης Τραπεζιού Μικρή | 16. Τριγωνικός Μοχλός |
| 6. Εσωτερική Σωλήνα | 17. Αποστάτης |
| 7. Βάση | 18. Εξωτερική Σωλήνα |
| 8. Ροδάκια με φρένο (x2) | 19. Βίδα |
| 9. Ροδάκια χωρίς φρένο (x2) | |

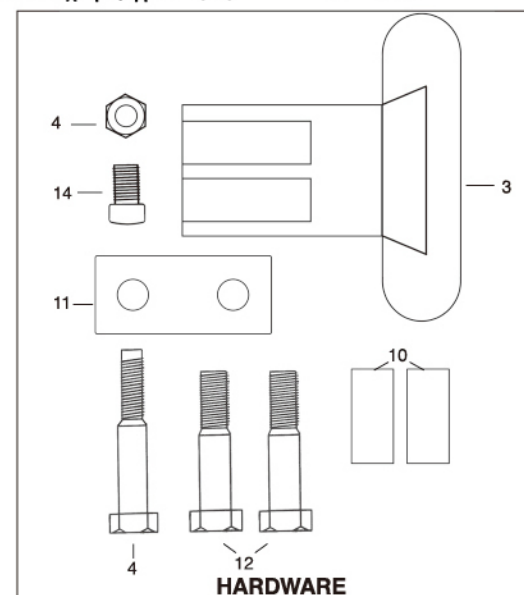

Οδηγίες Χρήσης

1. Για να ανυψωθεί το τραπέζι στο επιθυμητό ύψος, εφαρμόστε ελαφρά πίεση από κάτω σε οποιοδήποτε μέρος του τραπεζιού.
2. Για να κατεβεί, σπρώξτε τον μοχλό (3) προς τα πάνω και πιέστε την στήλη προς τα κάτω. Μην εφαρμόζετε πίεση στην αντίθετη άκρη του τραπεζιού. Η στήλη θα ασφαλίσει μόλις αφήσετε τον μοχλό.
3. Για να δώσετε κλίση, στρέψτε τον τριγωνικό μοχλό (16) αριστερόστροφα για να χαλαρώσει. Ρυθμίστε στην επιθυμητή γωνία και στρέψτε τον μοχλό δεξιόστροφα για να ασφαλίσει. Το μικρό μέρος του τραπεζιού δεν δέχεται κλίση.

Προφυλάξεις Συναρμολόγησης

Το τραπέζι χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό ελατηρίου υψηλής τάσης, ΜΗΝ αφαιρέσετε και αντικαταστήσετε την Μαύρη Βίδα (13) παρα μόνον όταν το τραπέζι είναι πλήρως συναρμολογημένο. ΜΗΝ σφίγεται υπερβολικά τις βίδες, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία για την συναρμολόγηση.

Σημαντικές Προειδοποιήσεις

Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προφυλάξεις για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή καταστροφή περιουσίας.

Επιθεωρείτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση του. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αν φαίνεται ελαττωματικό ή ασταθές και ΜΗΝ παρεμβαίνετε στην κατασκευή του.

Ενδεδειγμένη Χρήση

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ως μεταφερόμενο τραπέζι ασθενούς για διάβασμα, φαγητό, ή στήριξη μικρών αντικειμένων όπως γυαλιά, τηλέφωνο, βιβλία για εύκολη πρόσβαση.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση ΜΟΝΟ.

Δεν είναι σχεδιασμένο να κρατά ηλεκτρικές συσκευές (όπως τηλεόραση, οθόνη υπολογιστή, καφετιέρα κλπ.) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε υπερβολική ζέστη ή φωτιά.

Μέγιστο Βάρος που δέχεται είναι τα 22 κιλά. Το βάρος θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα καταμεμημένο στην επιφάνεια του τραπεζιού, και το τραπέζι να βρίσκεται στο χαμηλότερο ύψος του για να διατηρείται η ισορροπία του.

ΜΗΝ υπερφορτώνετε το προϊόν γιατί μπορεί να καταστραφεί και να οδηγήσει σε τραυματισμό ή καταστροφή περιουσίας.

Χρησιμοποιήστε το ΜΟΝΟ σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση του. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθεί ως: Επιφάνεια ύπνου, περιπατητήρας, βοήθημα βάδισης, για να στηριχθεί, να σηκωθεί ή να αποφύγει την πτώση κάποιος, ή για να μεταφέρει αντικείμενα.

Εγγύηση 2 ετών

Το προϊόν αυτό έχει εγγύηση 2 ετών ότι δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα στα υλικά ή την κατασκευή του προϊόντος για τον αρχικό αγοραστή.

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και έχει ελεγχθεί προσεκτικά πριν την αποστολή της. Η εγγύηση οφείλεται στην εμπιστοσύνη που έχουμε στα υλικά μας και στην βεβαίωση προς τον πελάτη για μακροχρόνια αξιοπιστία.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που οφείλεται σε κακή χρήση του καταναλωτή, ή φυσική φθορά λόγω χρόνου. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα μη-ανθεκτικά υλικά όπως λάστιχα, ροδάκια, λαβές, που φθείρονται λόγω χρήσης και χρειάζονται περιοδική αντικατάσταση.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.